

Tubo Separador de Dedos y Corrector Juanete HV06

Descripcion

El tubo de manga se puede llevar en el dedo grande del pie o en el segundo dedo, proporcionando una protección completa para su dedo del pie de rozaduras dolorosas y causantes de ampollas, manteniéndolo fresco y recto, ayuda con uniones, dedos superpuestos, dedos del pie y dedos martillo.

? Modo de uso: Insertar el tubo en el dedo a utilizar, gire el dissipador de gel entre los dos dedos del pie. Se puede llevar con pies desnudos o en calcetines.

Alivio del dolor de huesos: diseñado para proporcionar alivio de dolor instantáneo para tu dedo gordo del pie del juanete de dolor de pies, superposición de dedos y deriva. Lo más importante es que el cojín de gel mantiene los dedos rectos en lugar de inclinarse en el dedo del pie, evita problemas de Hallux Valgus y alisa los huesos de los pies.

? Talla única que se adapta a la mayoría de pies. La longitud de la manga del tubo está diseñada para el dedo grande y el segundo dedo. Sólo recuerda, si lo llevas en el dedo grande durante varios días, el inserto de silicona, se adapta al dedo grande y luego no puede usarse en dedos más pequeños.

? Reutilizable y lavable: vienen con 2 pares y tendrás un repuesto cuando el otro par esté limpio. Son lavables a mano y reutilizables.

Recomendación de uso:

Para obtener mejores resultados utilice calcetines y zapatos que se ajusten al pie para evitar deslizamientos.

Aplicar un poco de talco para facilitar la puesta.

Mantenimiento:

Lavar a mano el producto con un jabón suave y aclarar abundantemente con agua.

No usar lejías ni limpiezas en seco.

Secar al aire libre pero evitar el sol directo.

Aplicar un poco de talco después del secado para proteger el producto.

Tallas: única

