

# Spray de Silicona Rystora 30 ml

## Descripcion

### USOS

La silicona en Spray protege la piel creando de forma rápida, una película transparente, transpirable, impermeable, de secado rápido y protector anti adherente.

Ayuda a los cortes menores de la piel, abrasiones, ampollas y heridas suturadas.

Crea una barrera transpirable e impermeable.

Evitar la irritación de la piel causada por la fricción y evitar el contacto con el agua, orina, heces, manteniendo la piel seca y cómoda.

Crea una barrera protectora contra la invasión química, física y microbiana de la cicatriz mientras contribuye a la hidratación de la piel.

### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Spray protector de piel Rystora REF.NO: SY01030

La composición de los componentes son: 30 ml de silicona volátil, aceite líquido

(hexametildisiloxano y

Polytrimetilhidrosililsiloxano).

Comportamiento bio compatible, inodoro e insípido, de secado rápido en 5 segundos, después del rociado, sin alcohol y sin picar, resistente al agua y transpirable, sin pegajosidad después del secado y no se adhiere a la ropa, etc.

Antes de usar, sacar la tapa y presionar el dispensador para generar la salida del líquido protector del aerosol, entonces la neblina es rociado sobre la piel a través de la boquilla.

### CONTRAINDICACIONES

1. No use el spray protector de la piel Rystora en áreas infectadas o áreas de piel sin curar.
2. El producto puede usarse en adultos, niños y bebés, mayores de dos años de edad.

### PRECAUCIONES Y OBSERVACIONES

1. El spray protector de la piel Rystora contiene sustancias extremadamente inflamables. hexametildisiloxano. No lo use cerca de fuentes de ignición o dispositivos productores de calor y fuentes de descarga estática.
2. Solo para uso externo, use en un área bien ventilada, evite inhalación y contacto con los ojos.
3. Proteger de la luz solar y no exponer a altas temperaturas
4. No está destinado a ser utilizado en combinación con otros medicamentos preparados.
5. Si se aplica spray protector de piel Rystora en áreas con pliegues o articulaciones de la piel, abra los pliegues de la piel, luego rocíe esta área.

6. Deje de usar cuando su piel sienta una erupción o irritación y consultar a un médico.
7. Mantener fuera del alcance de los niños.

#### INSTRUCCIONES DE USO

1. Agite bien antes de usar. Limpie y seque completamente la piel.
2. Saque la tapa, antes de usar.
3. Sostenga la boquilla de pulverización aproximadamente de 10 cm a 15 cm (4 a 6 pulgadas) de la piel, y siga presionando la bomba dispensador, luego se rocía, en forma de niebla y aplique una capa uniforme en un movimiento de barrido sobre la piel.
4. La primera capa necesita esperar (aproximadamente 5 segundos) antes de aplicar otra capa. Repita la aplicación en tres capas, por cada vez que use este producto.
5. Según el tipo de lesión, se recomienda repetir la aplicación cada 4 horas.
6. Vuelva a colocar la tapa sobre la boquilla de pulverización, cuando no esté en uso.

#### DESECHO DEL DISPOSITIVO

1. Deseche la botella vacía de HDPE solo de acuerdo con las regulaciones de tu país.
  2. El ingrediente principal hexametildisilazano es volátil y los aceites de silicona son peligrosos para el medio ambiente acuático.
- Use los aerosoles antes de desechar la botella vacía.

#### ALMACENAMIENTO

El producto debe almacenarse solo en un ambiente fresco y seco.

#### ESTERILIZACIÓN

1. El producto no es estéril.
2. Consulte la etiqueta para ver el tiempo de vencimiento.