

Cojín Mover Enfermos y Pacientes DMORE

Descripcion

Cambie fácilmente de posición al paciente, evite riesgo de lesiones lumbares.

Ayuda al ejercicio en la cama, reduzca el riesgo de atrofia muscular.

Reducir la dificultad del cuidado de la excreción, reducir la carga para la familia.

Funda de almohada de PVC extraíble y lavables, para un mayor aseo.

Grupos aplicados: ancianos, pacientes postrados en cama, discapacidad, pacientes con fractura de miembros menores

Fácil de usar: coloque la parte baja de la rodilla en las ranuras del dispositivo de giro acostado, en posición horizontal, gire el cojín hacia el cuerpo del paciente, quedando en posición vertical, luego gire el dispositivo, desde las manillas laterales, dando vuelta al paciente en sentido horario o antihorario.

Usos: aseo en general, cambio de ropa, pañales, colocación de la chata y urinarios, masajes espalda, curaciones, etc.

Puede ser operado por una sola persona, reduciendo la carga de trabajo a los miembros de la familia

Material: la parte interior es de espuma de alta densidad valor 40, que no se deforma, la ranura suave en forma de U se adapta mejor a la pierna, puede evitar daños o molestias en las piernas.

Tamaño: 45 x 40 x 13 cm

Relleno interior: espuma elástica poliuretano, densidad 40 kg/m³

Funda PVC con cierres cremallera, para extraer el cojín

Manillas para girar

Cojín de 1 pieza